

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

The screenshot shows the SPARKvue application interface. At the top, the status bar displays the time 13:03, signal strength, and 68% battery. The app header includes a menu icon, the text "vyberte cestu" (choose a path), and the "PASCO" logo. A yellow callout box labeled "Data senzoru" points to the "Data senzoru" option.

vyberte cestu

Data senzoru


Ruční zadání
Ruční zadání dat do tabulky a zobrazení v grafu.

Data senzoru
Připojte senzory, zvolte měření a displeje.

Vzdálený sběr dat
Nakonfigurujte bezdrátový senzor pro vzdálený sběr dat nebo si stáhněte nahraná data.

Otevřete experiment PASCO Vytvořte nový experiment Otevřete uložený experiment

Zapněte senzory

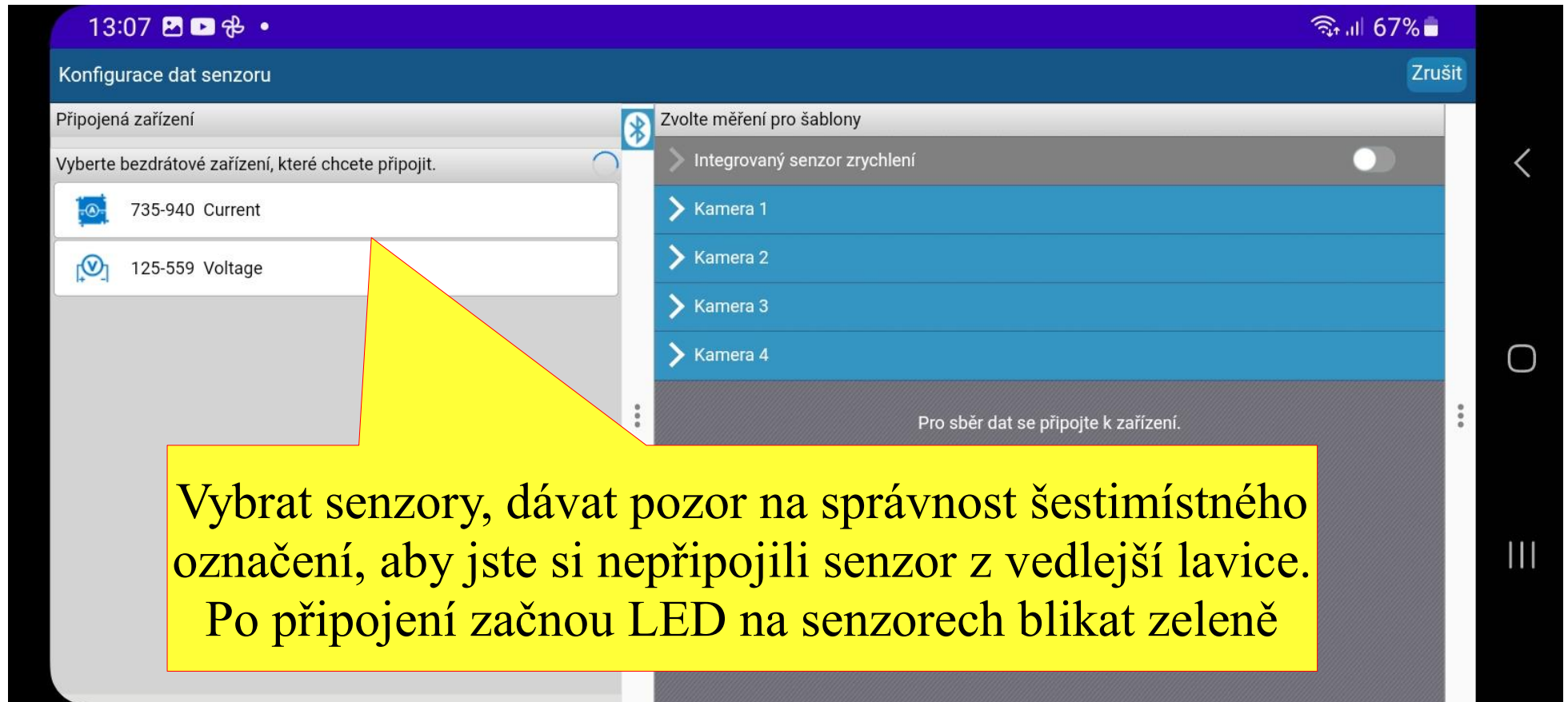

Pozn. senzory by měly být seřazeny dle vzdálenosti od telefonu.

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

Připojený senzor

Konfigurace dat senzoru Zrušit

Připojená zařízení

- 735-940
- 125-559

Vyberte bezdrát...

Zvolte měření pro šablony

- Bezdrátový modul proudu.
- Proud
- Integrovaný senzor zrychlení
- Kamera 1
- Kamera 2
- Kamera 3
- Kamera 4

Šablony

- Graf
- Tabulka a graf
- Číslo (1.23)
- Číslice a graf (1.23)

Pokusy Rychlého startu

Připojte ještě druhý senzor

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

13:07 67%

Konfigurace dat senzoru

Zrušit

Připojená zařízení

- 735-940
- 125-559

Vyberte bezdrátové zařízení

Zapněte bezdrátové zařízení

Zvolte měření pro šablony

- Bezdrátový modul proudu.
- Proud
- Senzor el. napětí bezdrátový
- Napětí
- Integrovaný senzor zrychlení
- Kamera 1
- Kamera 2
- Kamera 3
- Kamera 4

Šablony

- Graf
- Tabulka a graf
- 1.23
Číslo
- 1.23
Číslice a graf


Pokusy

- Přehledného startu
- Oscilo

Připojené senzory

Vyberte zobrazení čísel

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

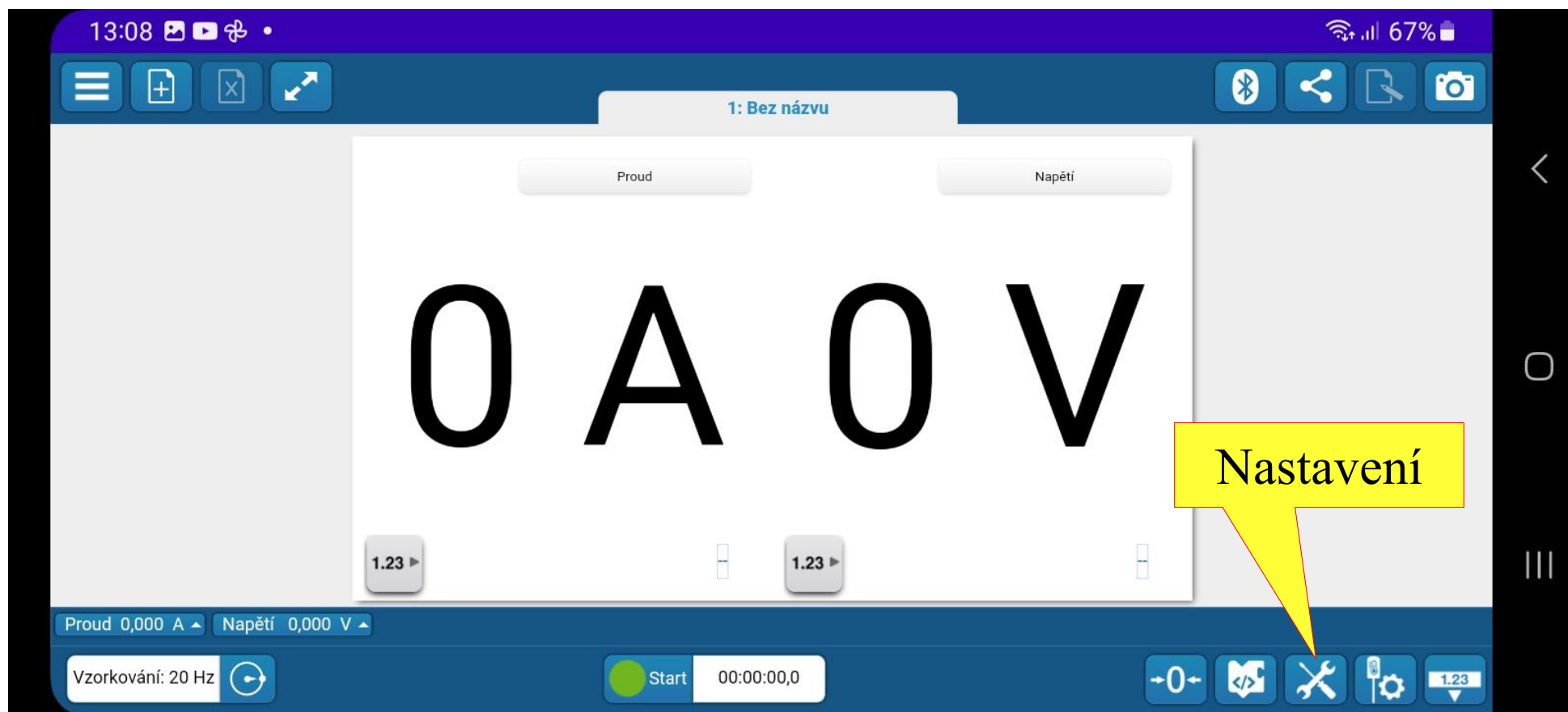


Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat



Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat


1) Rozbalit číselný formát

2) Výběr měření

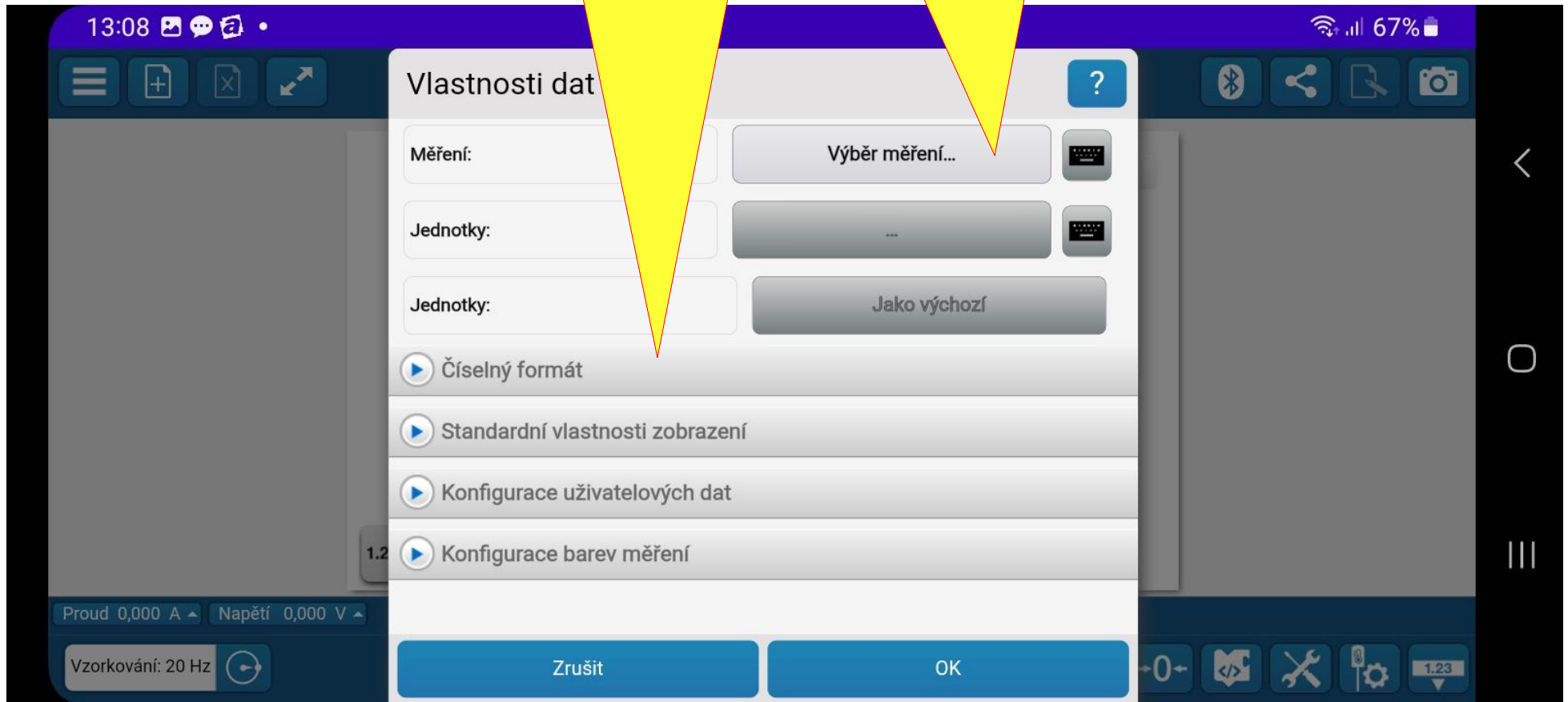


Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat


Vybrat jednu měřenou veličinu

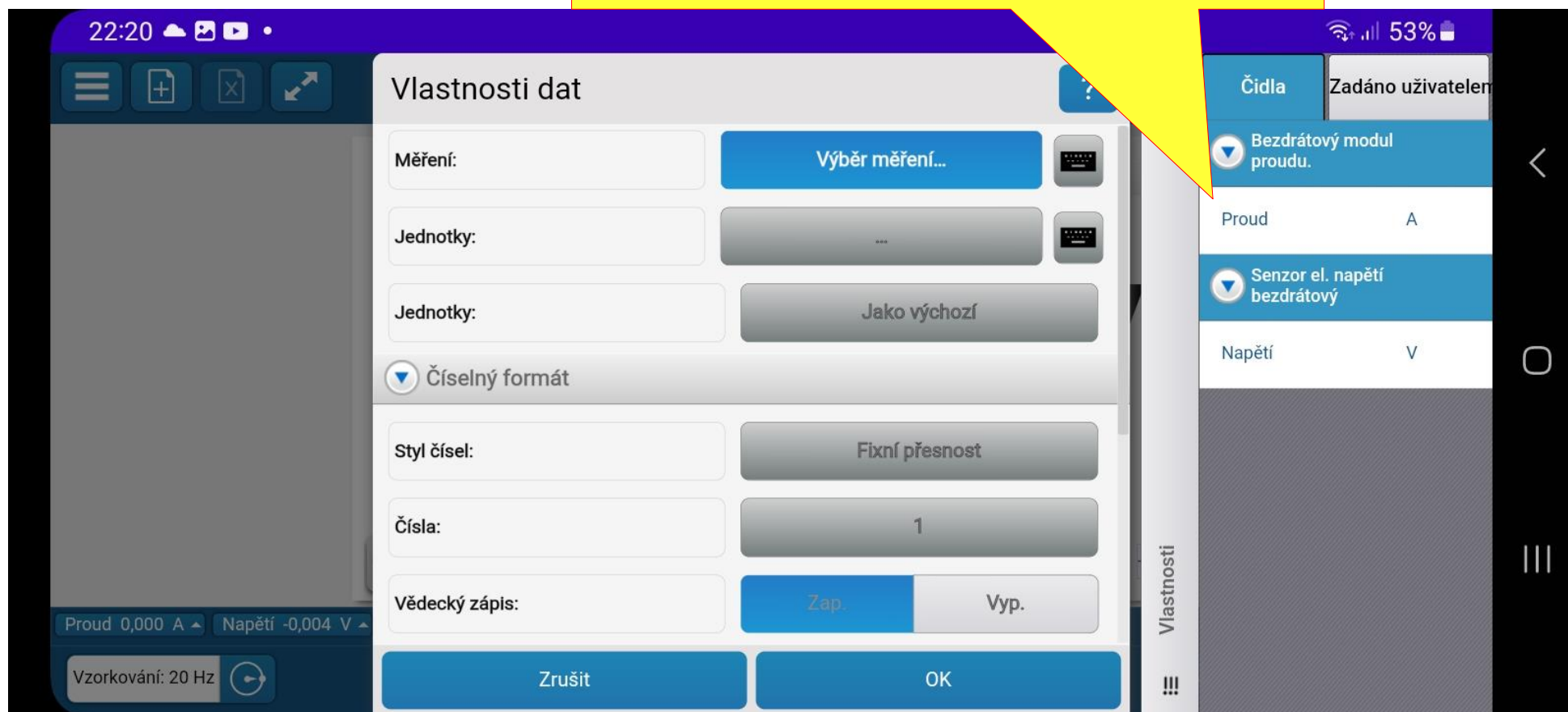

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

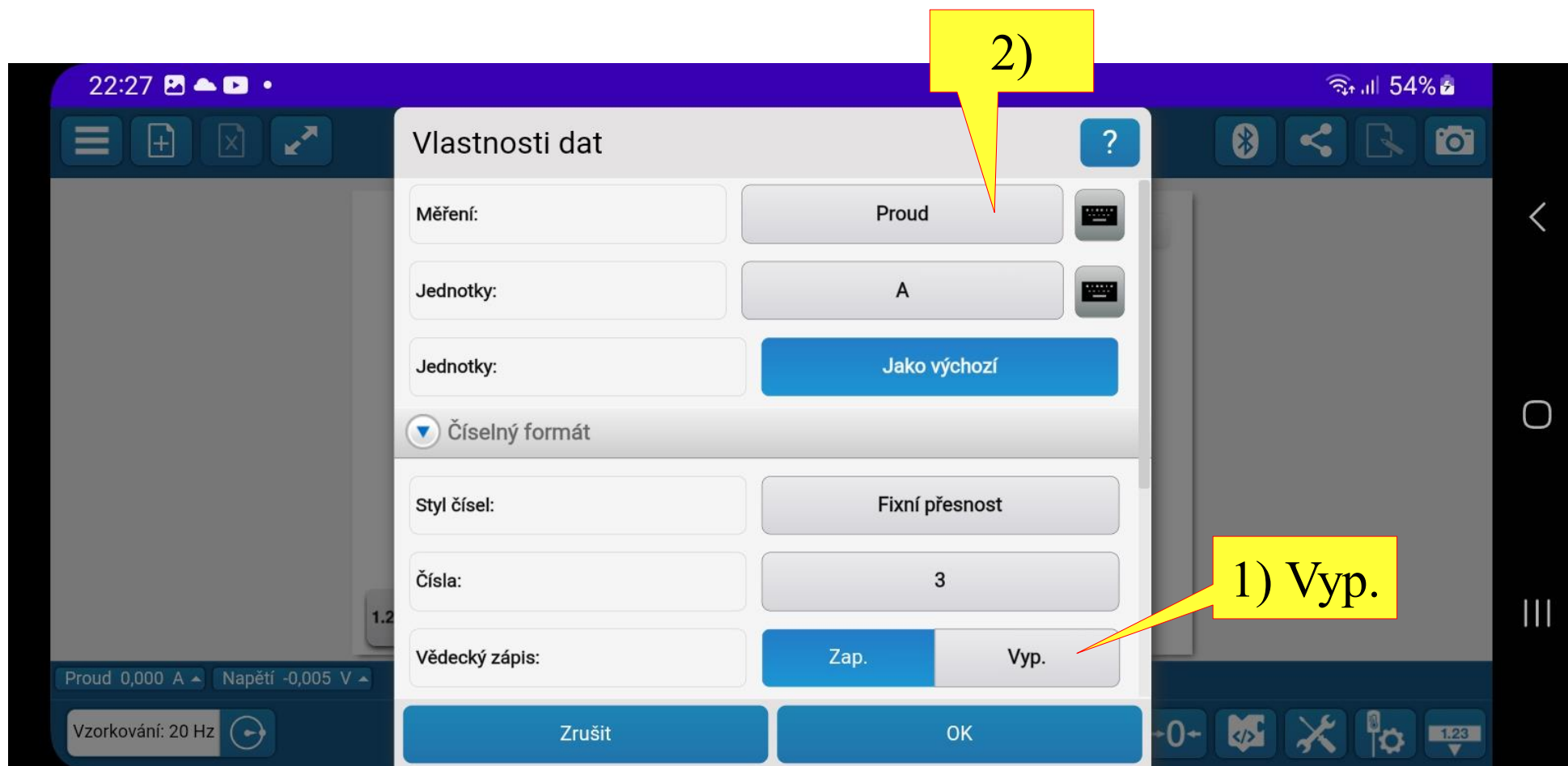


Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

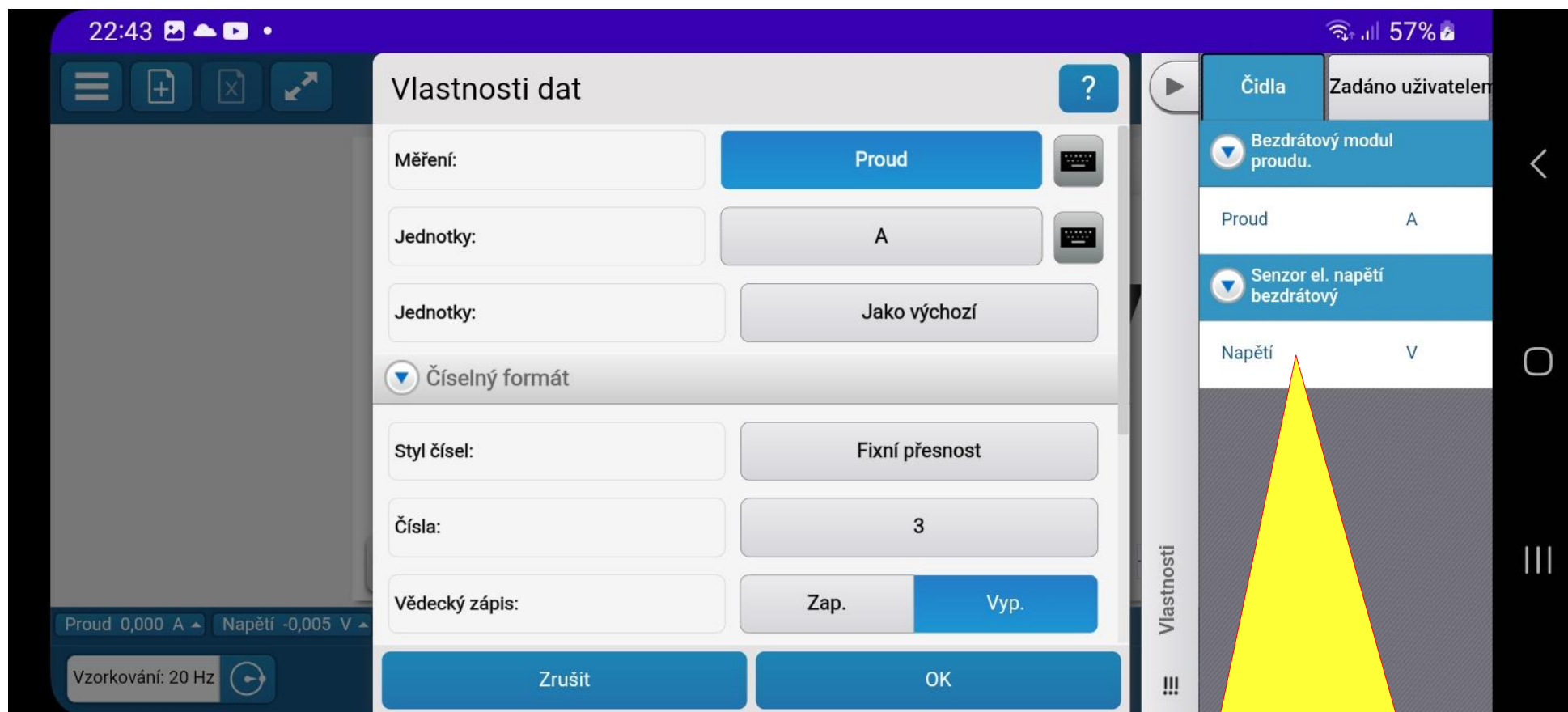


Vybrat druhou měřenou veličinu

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

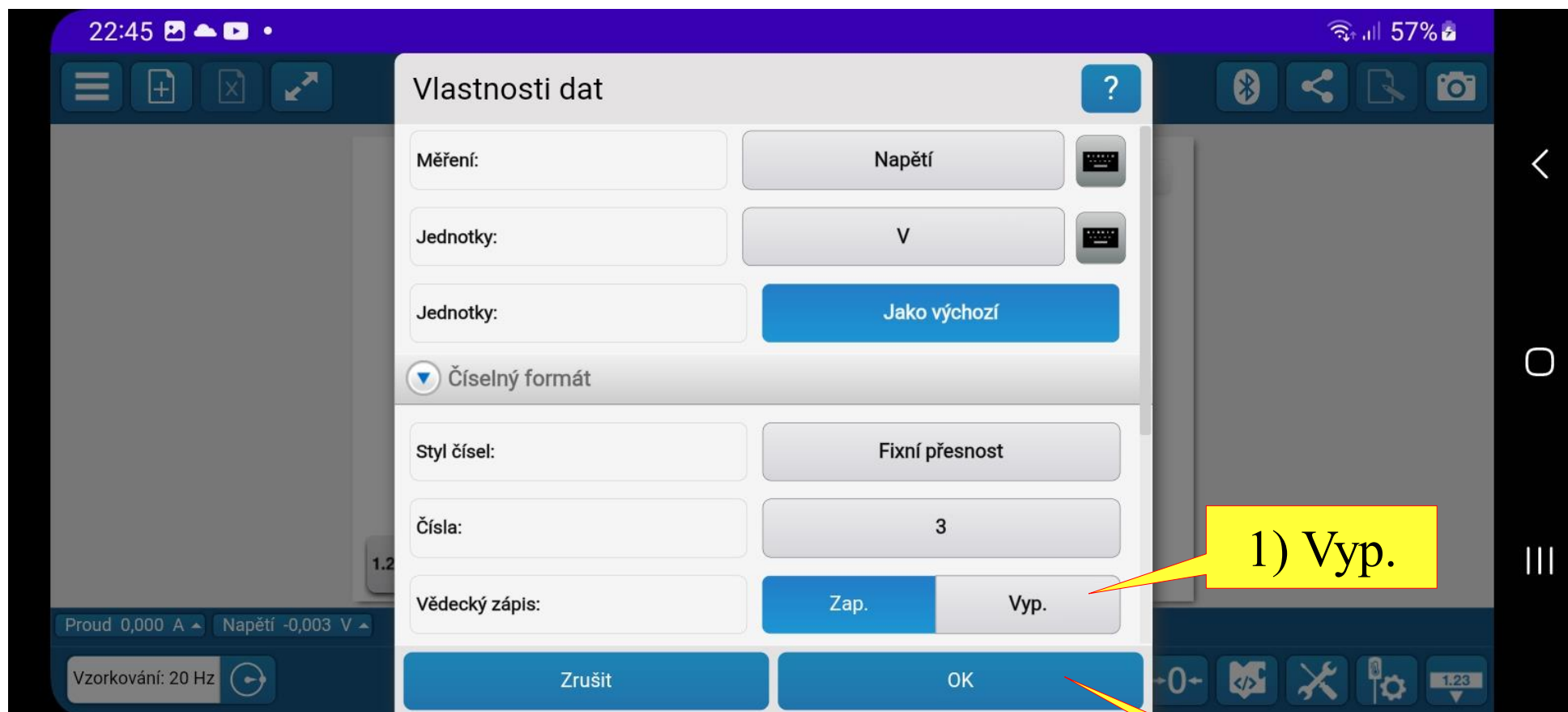


Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

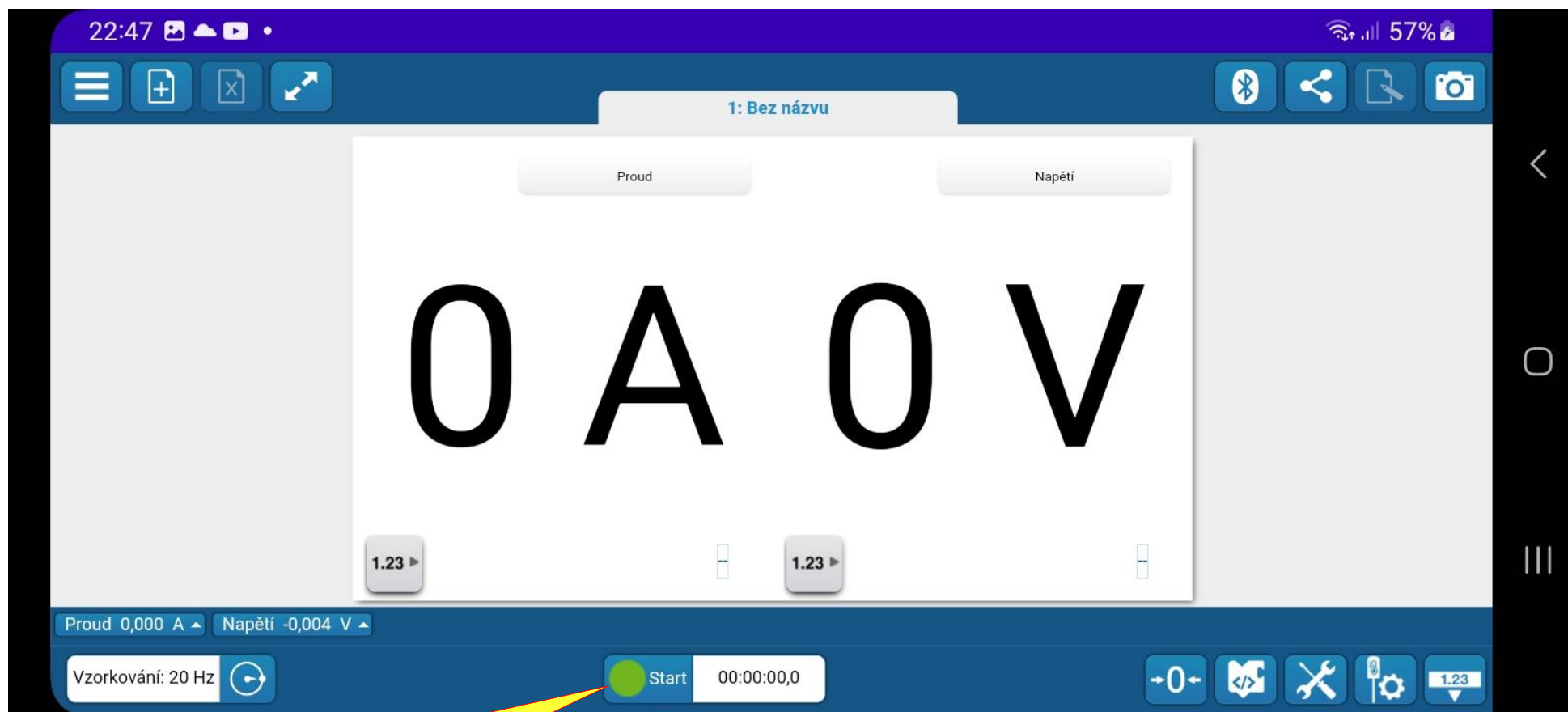

Start - spustíme měření

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

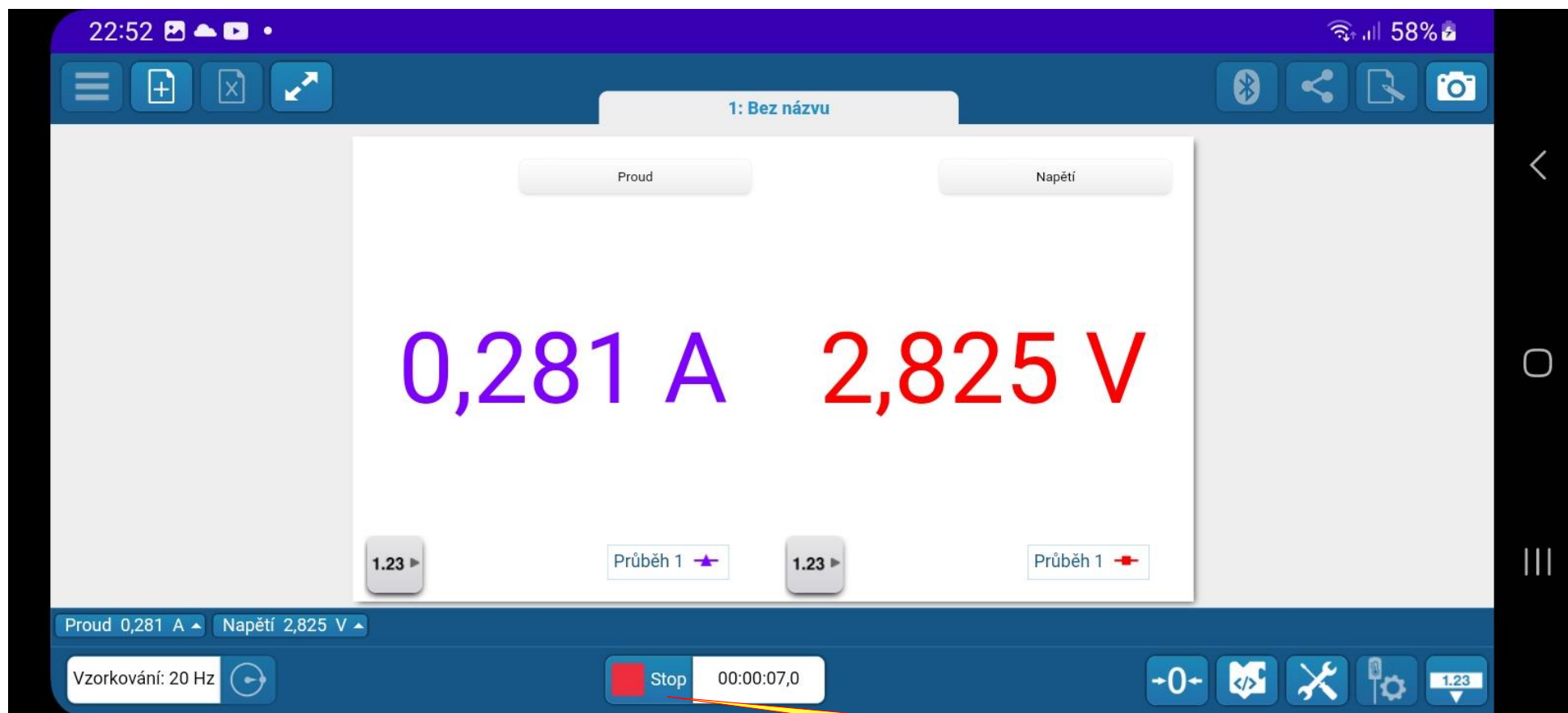

Pozn. měření napětí a proudu rezistorem 10Ω.

Stop – měření ukončí

Nastavení aplikace SPARKvue pro zobrazení měřených dat

